

Väggstation med 2 ögonspolningsflaskor - LTLY 2 -



De första sekunderna efter en ögonolycka är avgörande. En snabb vård kan förhindra permanenta ögonskador! Det är därför viktigt att ha rätt utrustning nära till hands på arbetsplatsen.

Ögonspolningsstationen placeras nära det farliga området (max 10 sekunder eller 30 meter bort). Den måste synas väl där den sitter, vara lättåtkomlig och ordentligt identifierad med en standardiserad skylt.

Stationen är utrustad med 2 flaskor innehållande en steril natriumkloridlösning. Använda flaskor byts lätt ut mot nya, öppnade flaskor.

Natriumkloridlösning, även kallad koksaltlösning, används för att spola bort främmande kropp ur ögat. En främmande kropp är ett främmande material såsom t.ex. sågdam, trä- och metallflisor, sandkorn, damm, eller smuts som träffar ögat och fastnar på kornea, under ögonlocket eller nedre fornix. Skräp som inte omedelbart avlägsnas från ögat kan orsaka inflammationer och skador på hornhinnan. Vanliga tårar räcker inte alltid för att skölja rent ögat och i dessa fall används en ögonspolningsvätska.

► Produktbeskrivning

- Sterila flaskor som fästs uppochned på vägghållaren för att du lätt ska kunna kontrollera om flaskorna öppnats och därmed behöver bytas ut. Öppnade flaskor läcker nämligen vätska medan inga orörda flaskor gör det
- Hållbarhet: minst 2 år utan underhåll
- Mjukt sköljmunstycke som håller ögat öppet under spolning
- Flaskan öppnas både snabbt och enkelt genom rotation av munstycket
- Bildsymbolerna på vägghållaren beskriver hur flaskorna används

Plums ögonspolningsflaskor är mycket lättanvända!



Plocka bort flaskan från stationen horisontalt.

Vrid spolmunstycket tills förseglingen bryts.

Luta huvudet bakåt...

...eller framåt och spola.

- Spolvätskan måste träffa ögat i ett lagom hastigt, jämnt flöde. Tillämpa ett tryck på flaskan utan att klämma för hårt. Kontakta alltid läkare och fortsätt spola ögat i väntan på ambulans eller på vägen till vårdcentral.

Detta datablad utarbetades 12.03.2015 och ersätter alla tidigare utgåvor.

All ovan nämnd information är såvitt vi vet korrekt vid det angivna datumet för revidering.

Informationen är avsedd som en vägledning och skall därmed inte anses vara någon slags garanti eller kvalitetsspecifikation.

Detta informationsblad befriar på intet sätt användaren från att skaffa kännedom om och tillämpa de bestämmelser som styr hans verksamhet.